



**Vous présente**

**Alto et Alto Plus**



## Le seul téléphone amplifié pour malentendant ayant obtenu les certifications suivantes.

- TIA4953 certifié pour perte auditive, légère, moyenne et sévère
- TIA1083A certifié compatible pour jumelage magnétique avec les prothèses auditives
- Réglages audio simples et facile d'utilisation.
- Contrôle de tonalité personnalisable.
- Mains-libres avec contrôle de tonalité



## CARRACTÉRISTIQUES : CLARITY ALTO & ALTO PLUS

[TIA-4953](#) certifié pour perte auditive, légère, moyenne et sévère

- Amplifie les sons entrants jusqu'à **53 décibels** et **voix** jusqu'à 15 décibels
- [Digital Clarity Power™](#) technologie comparable à celle des meilleures prothèses numériques
- Sonnerie amplifiée (100 dBA)
- **Centre Audio Clarity** fonctions ergonomiques volume, amplification et tonalité au bout des doigts
- Mains-libres intégré à la base
- Clavier à grande touche rétro éclairé
- 10 boutons de mémoire programmable (ALTO)
- Service assistance technique à distance [ClarityLogic™](#)
- Clavier parlant (Anglais seulement)
- Avertisseur visuel de sonnerie
- Ports pour micro casque, écouteur/ boucle magnétique et vibreur de lit
- Fonctionne sur piles de secours lors de pannes de courant
- Conforme à la norme de compatibilité aux prothèses auditives TIA-1083



# ALTO PLUS



**CLAVIER PARLANT ; RÉPÈTE LES CHIFFRES COMPOSÉS (ANGLAIS SEULEMENT)**



**GRAND ÉCRAN D'AFFICHEUR ORIENTABLE FACILE À LIRE**



**PUISSANT MAINS-LIBRE POUR CONVERSATIONS CLAIRES**



## Mollette de volume

Facile à manipuler (demande moins de dextérité)

Plus précis qu'une glissière (le niveau de volume est indiqué à l'écran d'afficheur)

Sa finition caoutchoutée permet un meilleur contrôle

Récepteur "raccroché"


- Elle contrôle le volume de la sonnerie

Récepteur "décroché ou durant un appel"

- Elle contrôle le volume de l'amplificateur au combiné

En mode "mains-libres"

- Elle contrôle le volume du haut-parleur


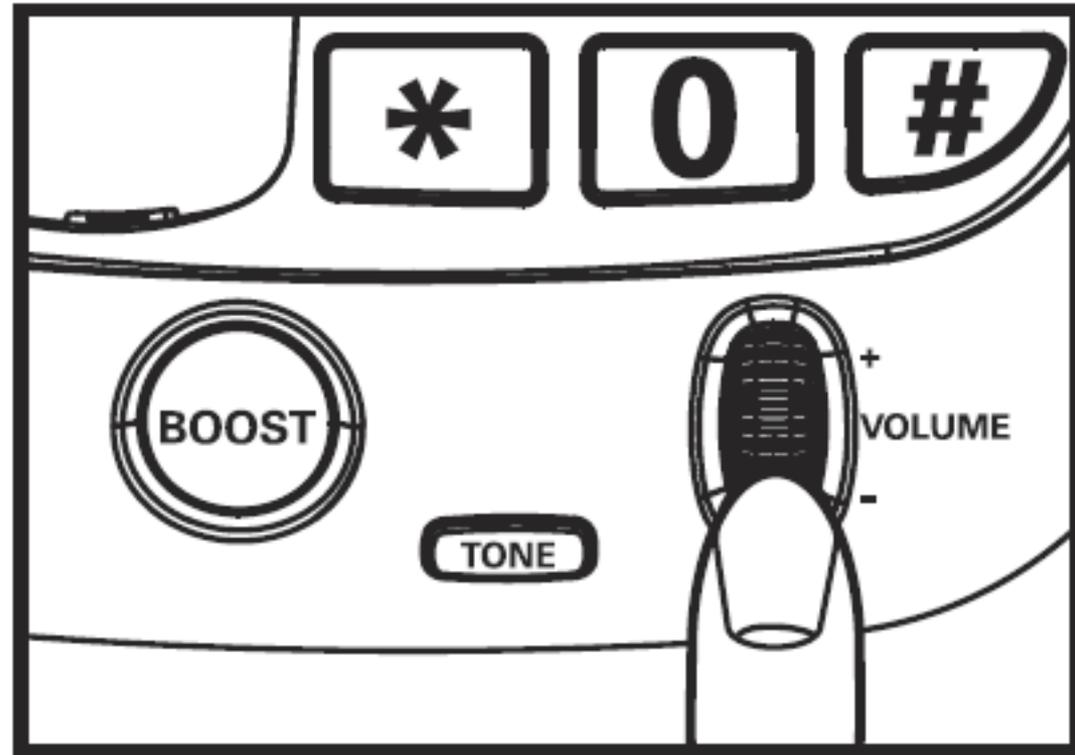


## Bouton BOOST (amplificateur)

1. Augmente le gain de volume de 16dB à 53dB au combiné


2. S'active et s'allume par lui-même automatiquement en augmentant le volume

1. Peut être contrecarré par l'interrupteur "BOOST Override" sous l'appareil.

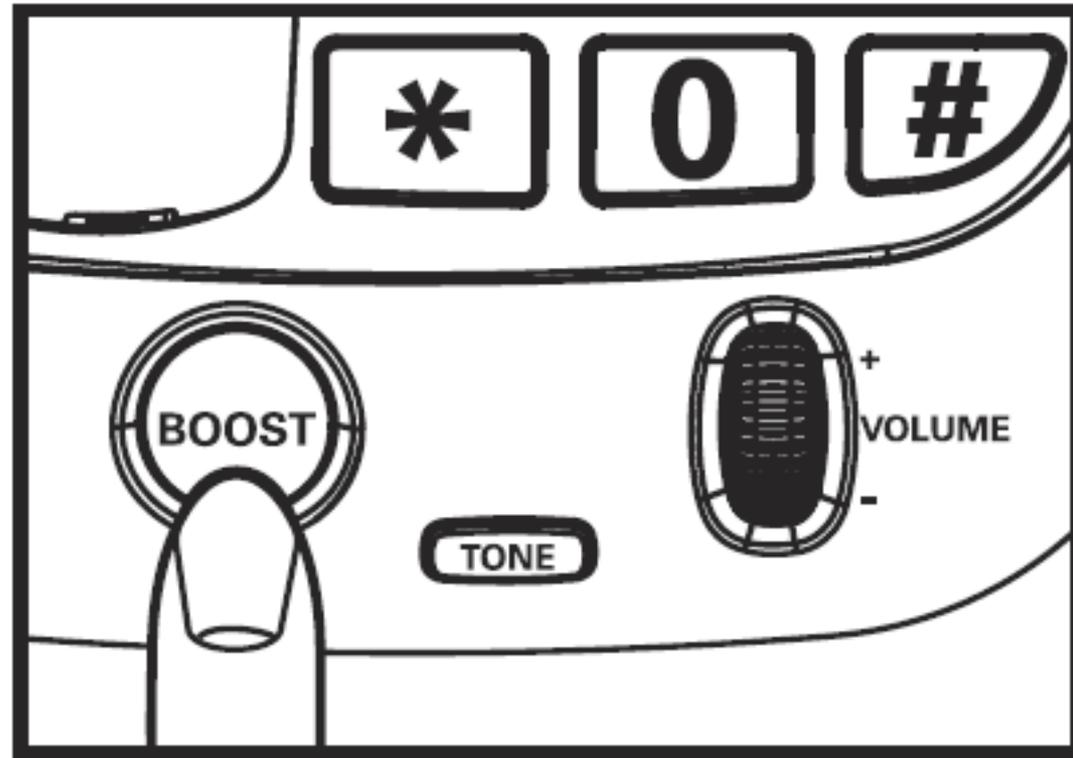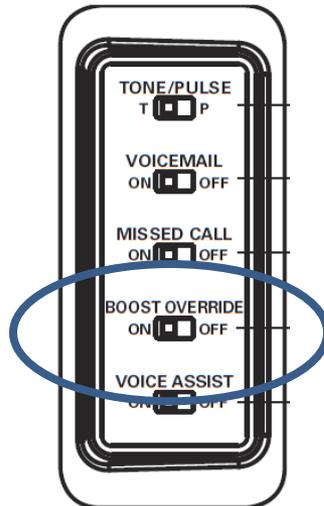


## Contrôle de tonalité

1. Facile à utiliser une seule touche (demande moins de dextérité)
2. Plus précis qu'une glissière (niveau de tonalité affiché de façon numérique)
3. Le contrôle de volume fonctionne également en mode mains-libres

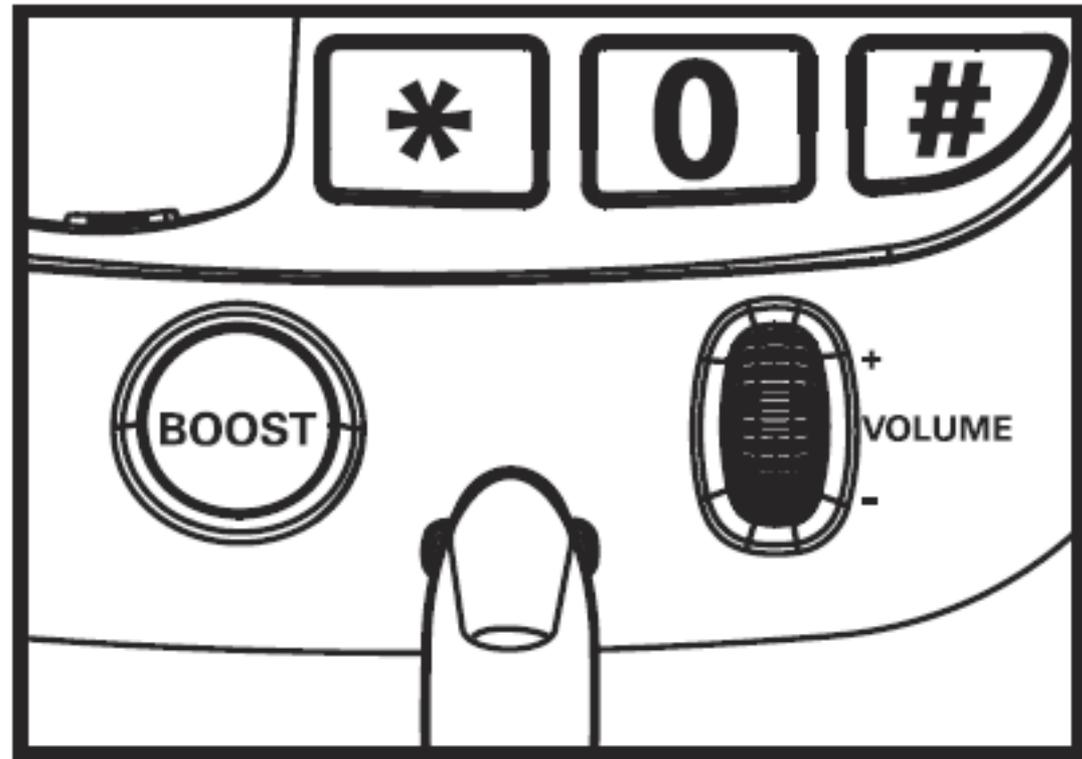

# Digital Clarity Power™

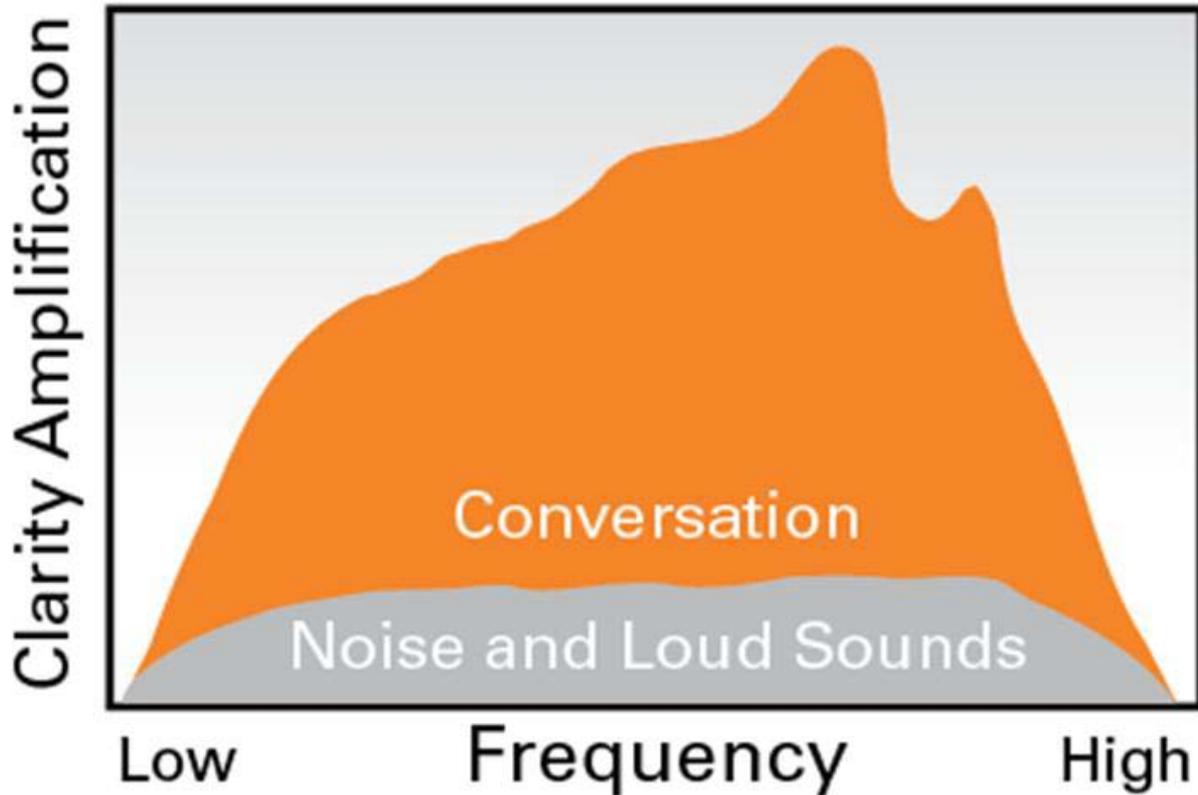


La technologie Digital Clarity Power emploie le même type de technologie que les prothèses numériques afin d'assurer la clarté des conversations.



## Ajustements de tonalité

# 1


Sons basses fréquence

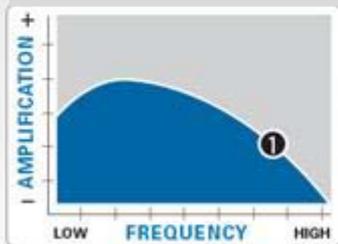

Seulement les sons basses fréquences sont amplifiés avec ce réglage, pour ceux qui ont peine à entendre les basses ou voix graves.

# 2


Accentuer tous les sons

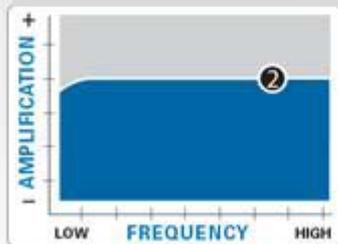

Tous les sons entrants sont amplifiés. Pour les utilisateurs voulant que l'ensemble des fréquences soient amplifiés. Ce réglage est d'ailleurs recommandé pour les porteurs de prothèses auditives.

# 3


Sons de hautes fréquences

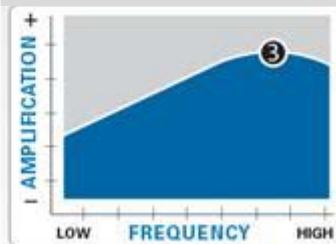

Seulement les fréquences hautes sont amplifiées et la parole est rehaussée. C'est le réglage moyen, à mi-chemin entre les réglages 2 et 4

# 4

Compression Multi bande

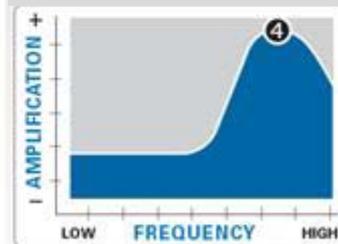

La compression multi bande amplifie les sons standards en atténuant les sons forts et soudains. Pour les gens qui entendent les mots mais ayant des problèmes à en comprendre la signification

**Contrôle de tonalité ajustable avec 4 réglages distincts pour une expérience d'écoute sans égal**

- Flash (ligne en attente)
- Redial (Recomposition)
- Pause – en mode de programmation cette touche permet d'insérer une pause de 2 secondes (utile avec des systèmes téléphonique à postes)
- Mute/Silent –

**Durant un appel:** coupe le son de votre microphone

**En mode repos:** éteint la sonnerie (ne pas déranger)

**Durant une sonnerie d'appel:** Arrête la sonnerie de cet appel mais n'empêche pas la sonnerie des appels suivant



## Assistance vocale

1. Clavier parlant (Anglais seulement)

2. Afficheur parlant– *De texte à voix*


- Même si le nom n'est pas dans votre répertoire, il annonce le nom transmit par la compagnie de téléphone
- Si le nom est déjà au répertoire il l'annoncera tel quel (*Ex.. Maman*)



Installez 4 piles AA (non incluse)  
\*\*n'installez pas de piles rechargeables dans ce téléphone!!

Les piles de secours ont pour but de faire fonctionner le téléphone en cas de panne de courant.

Lorsque les piles sont épuisées, le téléphone fonctionnera comme un appareil de type standard, sans amplification.

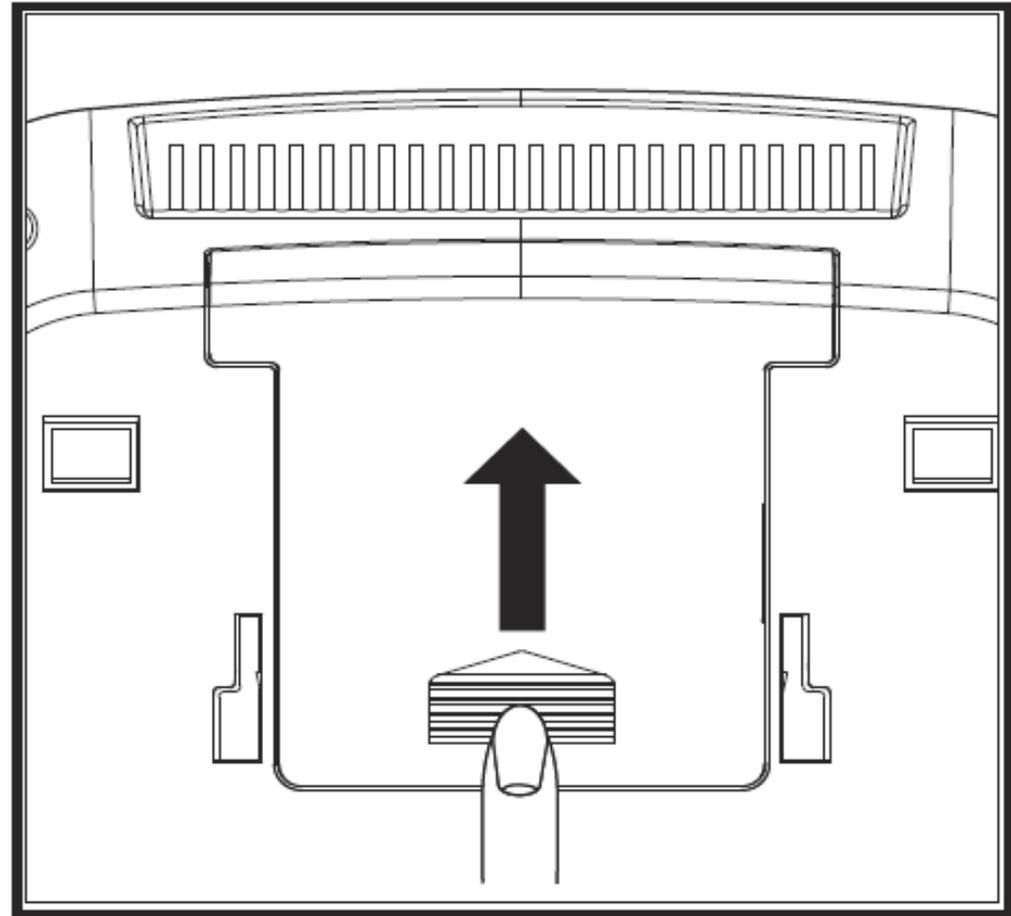

**APPYUEZ SUR CE BOUTON  
POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE**



**Afin de diagnostiquer un problème, programmer, personnaliser et comprendre votre téléphone, le service d'assistance Clarity Logic est là pour vous, au simple touché d'un bouton.**