



**Sonic Alert**  
*America's Leader in Visual Alerting Systems.*

## Réveil USB Sonic Boom avec vibreur pour lit et variateur à 5 niveaux

**Modèle SBT600ss**



### MODE D'EMPLOI

**IMPORTANT** – Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil et la conserver pour toute consultation ultérieure. Voir les instructions de fonctionnement au verso du document.


- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni pour brancher l'unité.

**Attention** : pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique assurez-vous que les exigences spécifiées sur l'appareil correspondent à l'alimentation électrique disponible, soit CA100-240V~, 50/60 Hz.

- La ventilation ne doit pas être entravée, les orifices d'aération doivent rester libres de tout objet, tel que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. ;
- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée ne devra être placée sur l'appareil.
- L'appareil ne sera pas installé à proximité d'un dispositif qui goutte ou soumis à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne devra être placé sur l'appareil, tel qu'un vase par exemple.
- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou sur un rack ne disposant pas d'une ventilation adéquate.
- Lorsque la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit toujours être facilement accessible.

## INSTRUCTIONS

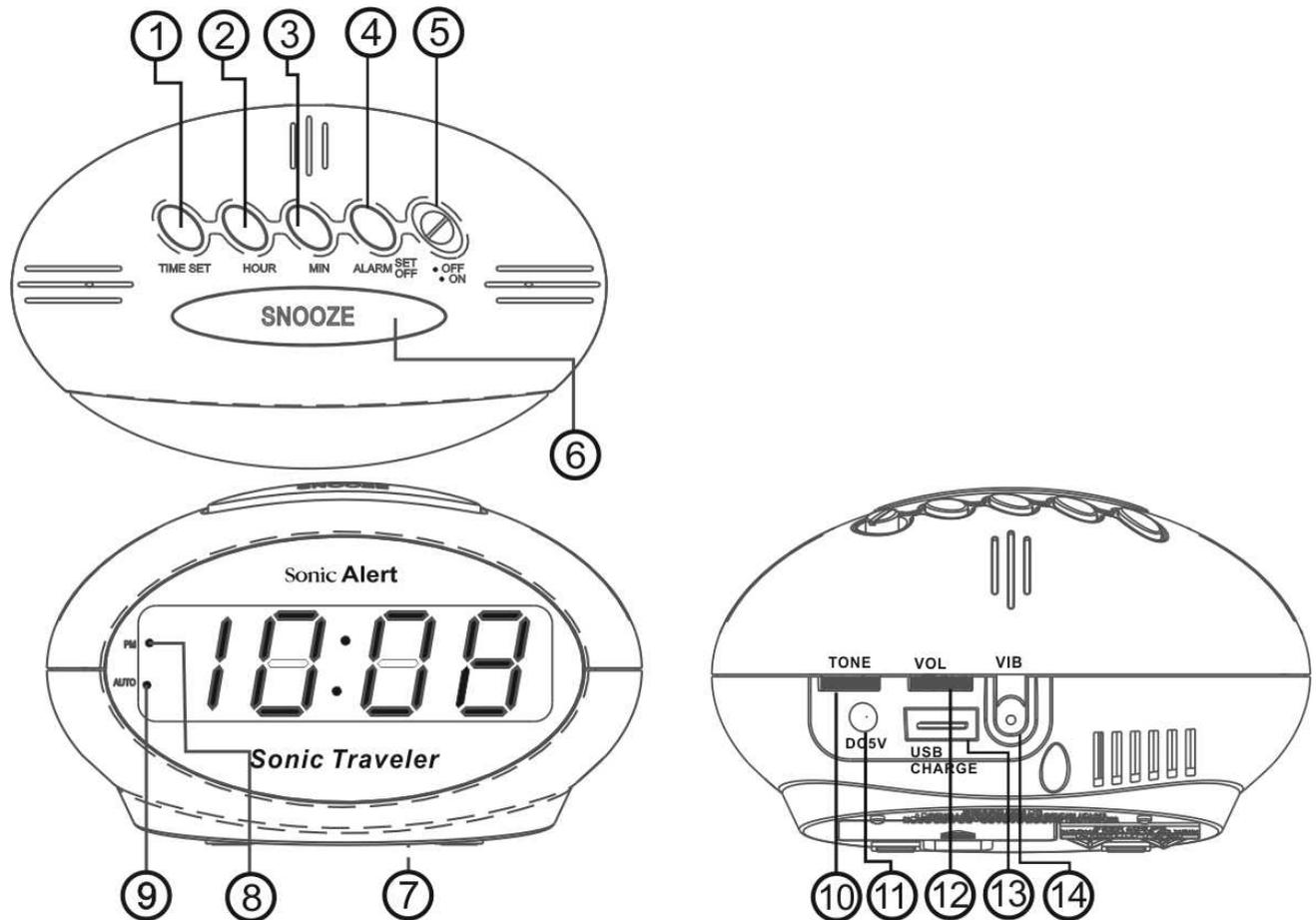

Les caractéristiques du produit figurent dans le schéma ci-dessus :

1. Réglage de l'heure	8. Indicateur PM
2. Heure	9. Automatique (Indicateur d'alarme activée)
3. Min.	10. Tonalité
4. Alarme activée / désactivée	11. Entrée CC5V
5. Alarme activée / désactivée	12. Volume
6. Rappel d'alarme / Variateur	13. Chargement USB
7. Couvercle de la batterie	14. Entrée du vibreur

### Mode de test :

- 1) Appuyez sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) et Time (réglage de l'heure) et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de test. L'écran affiche « 7ES7 » pour indiquer qu'il se trouve en mode TEST.
- 2) Si dans la minute qui suit, aucun bouton n'est pressé, il sortira du mode de test et reviendra en mode de réglage de l'heure.
- 3) Une pression sur un bouton dans la minute qui suit (sauf sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) et Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet), fera quitter immédiatement l'appareil du mode de test.
- 4) En mode de test, les fonctions du réveil sont affichées, à savoir l'avertisseur sonore, le flash et le vibreur (si ce dernier est branché).
- 5) Une fois les opérations du mode test terminées, appuyez sur un bouton quelconque (sauf sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) & Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet) pour quitter immédiatement ce mode.

**Réglage de l'heure –**

- 1) Appuyez simultanément sur les boutons **Time Set ( 1 ) (réglage de l'heure)** et **Hour ( 2 ) (heure)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les heures rapidement jusqu'au réglage correct.
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons **Time Set ( 1 ) (réglage de l'heure)** et **Minute ( 3 ) (minutes)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les minutes jusqu'au réglage correct. Un **point lumineux ( 8 )** placé dans le coin supérieur gauche de l'horloge indique les heures de l'après-midi au format américain (12h). Pour les heures matinales (AM), le point lumineux n'est pas allumé.

**Réglage de l'heure de déclenchement de l'alarme –**

- 1) Appuyez simultanément sur les boutons **Alarm Set ( 4 ) (réglage de l'alarme)** et **Hour ( 2 ) (heure)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les heures rapidement jusqu'au réglage correct.
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons **Alarm Set ( 4 ) (réglage de l'alarme)** et **Minute ( 3 ) (minutes)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler rapidement l'affichage d'alarme jusqu'au réglage correct.
- 3) Assurez-vous que l'heure de déclenchement de l'alarme est correctement réglée pour le matin (AM) ou l'après-midi (PM), le **point lumineux ( 8 )** indiquant les heures de l'après-midi. Veillez à relâcher les boutons HOUR et MIN avant de relâcher le bouton ALARM.

**Sélection du format 12 heures ou 24 heures –**

- 1) Appuyez sur le **bouton Hour (heure) ( 2 )** et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour entrer dans le mode de sélection de l'heure ; relâchez le **bouton Hour ( 2 )** lorsque l'écran affiche « 12 H » ou « 24 H ».
- 2) Appuyez sur le bouton de l'heure et relâchez-le pour basculer entre les formats 12 heures et 24 heures. Si aucune sélection n'est faite dans les 4 secondes, le dernier format d'heure s'affichera et l'appareil reviendra en mode horaire normal.

**Alarme du réveil –**

- 1) Si seul l'avertisseur est requis, ne branchez pas le vibreur.
- 2) Réglez le volume de l'avertisseur sonore souhaité à l'aide du **bouton de volume ( 12 )**.
- 3) Si seul le vibreur est requis, ne le branchez pas dans la **prise du vibreur ( 14 )** et désactivez le son à l'aide du **bouton de volume ( 12 )**.
- 4) Si les deux fonctions, avertisseur sonore et vibreur, sont requises, branchez le vibreur et réglez le volume sur le niveau souhaité.
- 5) Réglez l'alarme de réveil selon les instructions citées ci-dessus.

**Régler la durée de l'alarme**

Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est réglé sur 30 minutes ; vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme :

- 1) Appuyez sur le **bouton AL. SET (réglage de l'alarme) ( 4 )** puis maintenez-le enfoncé pendant six secondes. L'écran du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '30', relâchez le **bouton AL.SET**.
- 2) Appuyez sur le **bouton « MIN » ( 3 )** pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 59 minutes).
- 3) Lorsque la durée d'alarme souhaitée s'affiche à l'écran, l'appareil retourne en mode normal, après trois secondes. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

### **Arrêter l'alarme –**

L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.

- 1) Afin que l'alarme s'arrête, appuyez simplement sur le bouton **AL off (4) (arrêt de l'alarme)**. L'alarme s'arrêtera automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le réglage de l'alarme n'a pas été modifié.
- 2) Pour arrêter l'alarme de façon permanente, faites glisser le **commutateur de fonction ON/OFF (5)** sur la position off (arrêt). L'alarme ne sera pas réactivée avant d'avoir remis le **commutateur de fonction ON/OFF (5)** sur la position On.

### **Fonctionnement du rappel d'alarme–**

Appuyez sur le bouton **SNOOZE (6)** (rappel d'alarme) après que l'alarme ait retenti. L'alarme sera désactivée et vous bénéficierez de 9 minutes de sommeil supplémentaire. L'alarme retentira à nouveau après 9 minutes. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération, jusqu'à 119 minutes.

### **Réglage de la durée du rappel d'alarme**

Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est réglé sur 9 minutes, mais vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du rappel d'alarme :

- 1) Appuyez sur le **bouton SNOOZE (rappel d'alarme) (6)** et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'écran du réveil affichera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '9'. Relâchez le bouton de rappel d'alarme.
- 2) Appuyez sur le bouton « MIN » (3) pour régler la durée du rappel d'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 30 minutes).
- 3) Lorsque la durée du rappel d'alarme souhaitée est affichée à l'écran, l'appareil, retourne en mode normal après 3 secondes. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

### **Volume –**

Pour régler le volume, faites tourner la **molette de volume (2)** jusqu'au niveau désiré.

### **Tonalité –**

Réglez la tonalité en tournant la **molette de tonalité (10)** jusqu'au niveau désiré.

### **Fonctionnement du variateur**

Il existe une fonction de réglage à 5 niveaux de l'écran DEL. Appuyez une fois sur le **bouton SNOOZE (6)** pour modifier la luminosité de l'écran. Le cycle de luminosité passera de 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (de clair à sombre, puis de sombre à clair).

**\*REMARQUE\* : le variateur ne fonctionne pas si le réveil se trouve en mode de rappel d'alarme.**

### **Vibreux pour lit / vibreur –**

- 1) Fixez le connecteur du vibreur pour lit au dos du réveil, sur **l'entrée du VIBREUR (14)**.
- 2) Placez le vibreur sous le matelas ou l'oreiller.

### **Chargement USB**

Ce réveil est équipé d'un port USB pratique, placé sur le panneau arrière, qui permet de recharger les téléphones portables, lecteurs de disques mobiles et autres appareils portables de plusieurs marques différentes, fournis avec un câble USB. La puissance de sortie du port USB est de 500mA.

Pour charger votre appareil, branchez le câble USB, fourni avec votre dispositif portable dans le **port USB (13)** placé sur le panneau arrière de ce réveil. Vérifiez l'indicateur sur votre appareil pour confirmer qu'il est bien en train de se charger.

**Remarque :** la durée de charge variera en fonction du courant de charge requis par votre appareil. Par conséquent, certains appareils prendront plus de temps à se charger que d'autres.

**Batterie de secours –**

Pour utiliser la batterie de secours, installez une pile alcaline de 9V à la base du réveil, dans le **compartiment des piles (7)**. Veuillez noter qu'en cas de coupure d'électricité, l'écran LED n'affichera plus l'heure, mais l'horloge continuera de fonctionner et affichera l'heure correcte dès que l'appareil sera à nouveau alimenté en électricité.

**REMARQUE :** pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide.

**Alimentation d'entrée CC 5V –**

Fixez l'adaptateur de courant CC au dos de l'horloge sur l'entrée référencée DC5V  IN (11 ).

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Adaptateur secteur homologué UL CA100-240V~, 50/60Hz

Consommation électrique : Sortie de l'adaptateur : CC5V , 800mA

Puissance de charge du port USB : 500mA

 <p>L'éclair et la flèche qui clignotent à l'intérieur du triangle sont des symboles d'alerte qui vous préviennent d'une tension dangereuse présente dans l'enceinte du produit.</p>	<p><b>MISE EN GARDE :</b>          POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU) ARRIÈRE DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST INTÉGRÉE AU PRODUIT. VEUILLEZ VOUS ADRESSER A VOTRE REVENDEUR SONIC ALERT.</p>	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle est un symbole d'avertissement qui vous signale la présence d'instructions importantes sur le produit.</p>
--	--	---

**AVERTISSEMENT :** POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**Les fortes interférences électromagnétiques peuvent entraver le fonctionnement normal de l'appareil. Dans ce cas, il suffit simplement de débrancher, puis de rebrancher l'adaptateur de puissance, afin que l'appareil puisse refonctionner normalement. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, mettez-le dans un autre endroit.**

- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous vous débarrassez des piles ;
-  les points de collecte sont différents s'il s'agit d'appareils électriques ou électroniques.

***GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE PRODUIT SONIC ALERT***

Le réveil Sonic Boom est garanti pendant un (1) an, à compter de la date d'acquisition, contre les défauts de fabrication et de matériel. Au cours de cette période Sonic Alert réparera ou remplacera sans aucun frais sur les pièces et la main d'œuvre et à sa seule discrétion l'appareil. Contactez notre service clientèle afin d'obtenir un RA (numéro d'autorisation de retour) et des informations sur la manière de procéder pour retourner votre produit. Appelez le No 1-888-864-2446 ou envoyez un courriel à [RMA@sonicalert.info](mailto:RMA@sonicalert.info). Une copie de la quittance d'achat est nécessaire pour l'obtention du numéro d'autorisation.

***Sonic Alert Warranty Center, 1081 West Innovation Dr., Kearney, MO 64060***

## **Sonic Alert**

**Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083**

**[www.SonicAlert.com](http://www.SonicAlert.com) 1-888-864-2446**

**Fabriqué en Chine**