



## Réveil USB Sonic Boom avec vibreur pour lit et variateur à 5 niveaux

### Modèle SBT625ss



### MODE D'EMPLOI


- IMPORTANT**
- veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit et la conserver pour toute consultation ultérieure. Voir les instructions de fonctionnement au verso du document.
  - Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni pour brancher l'unité.

**Avertissement:** pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique assurez-vous que les exigences spécifiées sur l'appareil correspondent à l'alimentation électrique disponible, soit CA100-240V~, 50/60 Hz.

- La ventilation ne doit pas être entravée, les orifices d'aération doivent rester libres de tout objet, tel que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. ;
- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée ne devra être placée sur l'appareil.
- L'appareil ne sera pas installé à proximité d'un dispositif qui goutte ou soumis à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne devra être placé sur l'appareil, tel qu'un vase par exemple.
- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou sur un rack ne disposant pas d'une ventilation adéquate.
- Lorsque la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit toujours être facilement accessible.

## INSTRUCTIONS

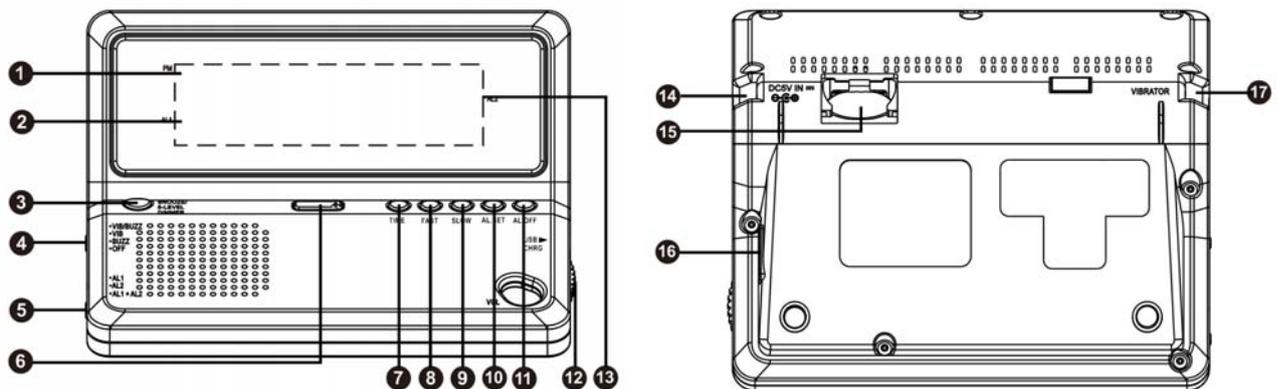

Les caractéristiques du produit figurent dans le schéma ci-dessus:

1. Réglage de l'heure avec indicateur PM	9. Lent
2. Indicateur de l'alarme 1	10. AL. Réglage
3. Rappel d'alarme / Variateur	11. AL. OFF
4. Commutateur du mode alarme (Off, Avertisseur, VIB)	12. Volume
5. Sélectionneur d'alarme (AL1, AL2)	13. Indicateur de l'alarme 2
6. Réglette de tonalité	14. Entrée CC5V
7. Heure	15. Couvercle de la batterie de secours
8. Rapide	16. Chargement USB
	17. Entrée du vibreur

**Mode de test:**

- 1) Appuyez sur les boutons **Snooze (3)** (rappel d'alarme) et **Time (7)** (réglage de l'heure) et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de test. L'écran affiche « 7ES7 » pour indiquer qu'il se trouve en mode TEST. Les fonctions de l'unité sont démontrées comme suit:
  - a) Faites glisser le **commutateur du mode alarme (4)** sur la position OFF, un son « VEE » retentira.
  - b) Faites glisser le **commutateur du mode alarme (4)** sur la position BUZZ, un son « VEE » retentira.
  - c) Faites glisser le **commutateur du mode alarme (4)** sur la position VIB, le vibreur se mettra à vibrer.
  - d) Faites glisser le **commutateur du mode alarme (4)** sur la position BUZZ & VIB, un bip retentira.
- 2) Si dans la minute qui suit, aucun bouton n'est pressé, le réveil sortira du mode de test et reviendra en mode de réglage de l'heure.
- 3) Pour quitter immédiatement le mode test, appuyez sur un bouton quelconque (sauf sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) & Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet).

**Réglage de l'heure –**

- 1) Appuyez simultanément sur les boutons **TIME (7)** (réglage de l'heure) et **Fast (8) (rapide)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les heures rapidement jusqu'au réglage correct.
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons **TIME (7)** (réglage de l'heure) et **Slow (9) (lent)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les minutes lentement jusqu'au réglage correct.

Un **point lumineux (1)** placé dans le coin supérieur gauche du réveil indique les heures de l'après-midi au format américain (PM). Pour les heures matinales (AM), le point lumineux n'est pas allumé.

**Réglage de l'heure de déclenchement de l'alarme –****Réglage de l'alarme 1**

- 1) Faites glisser le **commutateur de sélection de l'alarme (5)** sur la position **AL1**, l'indicateur d'alarme **AL1 (2)** s'allumera.

- 2) Appuyez sur les **boutons ALARM SET (10)** et **FAST (8)** ou **SLOW (9)** pour faire défiler l'écran du réveil jusqu'au réglage d'alarme souhaité.
- 3) Vérifiez que l'heure de déclenchement de l'alarme est correctement réglée pour le matin ou l'après-midi (1).

### Réglage de l'alarme 2

- 1) Une fois l'alarme AL1 réglée, faites glisser le **COMMUTATEUR DE SÉLECTION D'ALARME (5)** sur la position AL2, l'indicateur d'alarme **AL2 (13)** s'allume.
- 2) Appuyez sur les **boutons ALARM SET (10)** et **FAST (8)** ou **SLOW (9)** pour faire défiler l'écran du réveil jusqu'au réglage d'alarme souhaité.

### Sélection du format 12 heures ou 24 heures –

Appuyez sur le **bouton Fast** (défilement rapide) (8) et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour entrer dans le mode de sélection de l'heure ; relâchez le **bouton Fast** (8) lorsque l'écran affiche « 12 H » ou « 24 H ». Appuyez sur le **bouton FAST (8)** pour basculer entre les formats 12 heures et 24 heures. Si aucune sélection n'est faite dans les 4 secondes, le dernier format d'heure s'affichera et l'appareil reviendra en mode d'heure normal.

### Alarme –

#### Pour activer les alarmes:

Faites glisser le **commutateur du mode alarme (4)** sur la position souhaitée:-

- a) « OFF » pour désactiver l'alarme
- b) « BUZZ » pour l'avertisseur sonore
- c) « VIB » pour le vibreur de lit
- d) « VIB/BUZZ » aussi bien pour l'avertisseur que le vibreur de lit.

**REMARQUE:** une fois le mode de réveil choisi, il sera appliqué aux deux alarmes.

#### Pour sélectionner l'alarme:

- 1) Faites glisser le **commutateur de sélection de l'alarme (5)** sur la position AL1, l'indicateur d'alarme **AL1 (2)** s'allume pour indiquer que l'alarme 1 est activée.
- 2) Faites glisser le **commutateur de sélection de l'alarme (5)** sur la position AL2, l'indicateur d'alarme **AL2 (13)** s'allume pour indiquer que l'alarme 2 est activée.
- 3) Faites glisser le **commutateur de sélection de l'alarme (5)** sur la position AL1+AL2, l'indicateur d'alarme « **AL1** » (2) et « **AL2** » s'allument pour indiquer que les alarmes 1 et 2 sont activées.

### Modèles d'alarme –

Lorsque l'alarme est activée, le modèle d'alarme de l'avertisseur sonore / de l'affichage clignotant n'est pas synchronisé avec le vibreur. Cela signifie que lorsque l'avertisseur sonore / l'affichage clignotant est **ACTIVÉ**, le vibreur est **DÉSACTIVÉ** et lorsque l'avertisseur sonore / l'affichage clignotant est **DÉSACTIVÉ**, le vibreur est **ACTIVÉ**.

**ALARME 1** - Lorsque l'alarme 1 est activée, 3 bips retentissent pour l'avertisseur sonore, puis pour le vibreur. Ce modèle se répète jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.

**ALARME 2** - Lorsque l'alarme 2 est activée, 4 bips retentissent pour l'avertisseur sonore, puis pour le vibreur. Ce modèle se répète jusqu'à ce que l'alarme soit arrêtée.

### Régler la durée de l'alarme

Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est réglé sur 30 minutes ; vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme:

- Appuyez sur le bouton **AL. SET** (réglage de l'alarme) (10) puis maintenez-le enfoncé pendant six secondes. L'écran du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante: 30', relâchez le bouton. AL.SET.
- Appuyez sur le bouton **SLOW** (9) (lent) pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 59 minutes).
- Lorsque l'afficheur montre la durée d'alarme souhaitée, l'appareil, après trois secondes, retourne en mode normal. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

### Arrêter l'alarme –

L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.

- 1) Lorsque l'alarme s'arrête, appuyez simplement sur le bouton **AL off** (11) (arrêt de l'alarme). L'alarme s'arrête automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le réglage de l'alarme n'a pas été modifié.
- 2) Pour arrêter l'alarme de façon permanente, faites glisser le **commutateur du mode d'alarme (8)** sur la position OFF (arrêt). L'alarme n'est pas réactivée tant que le **commutateur du mode d'alarme (8)** est réglé sur une autre position.

### Fonctionnement du rappel d'alarme

**Bouton SNOOZE (3) (rappel d'alarme)** – appuyez sur ce bouton, une fois que l'alarme s'est déclenchée. Elle sera désactivée et vous bénéficierez de 9 minutes de sommeil supplémentaire. L'alarme retentira à nouveau après 9 minutes. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération, jusqu'à 119 minutes.

### **Réglage de la durée du rappel d'alarme -**

Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est réglé sur 9 minutes, mais vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du rappel d'alarme:

- Appuyez sur le **bouton SNOOZE (3)** (rappel d'alarme) et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'écran du réveil affichera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante: 9'. Relâchez le bouton de rappel d'alarme.
- Appuyez sur le **bouton SLOW (9)** (lent) pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 30 minutes).
- Lorsque l'afficheur montre la durée du rappel d'alarme souhaitée, l'appareil, après trois secondes, retourne en mode normal. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

### **Volume –**

Pour régler le volume, faites tourner la **molette de volume (12)** jusqu'au niveau désiré.

### **Tonalité –**

Réglez la tonalité en faisant glisser la **réglette de tonalité (6)** jusqu'au niveau désiré.

### Fonctionnement du variateur -

Il existe une fonction de réglage à 5 niveaux de la luminosité de l'écran LED. Appuyez une fois sur le **bouton SNOOZE (3)** pour modifier la luminosité de l'écran. Le cycle de luminosité passera de 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (de clair à sombre, puis de sombre à clair).

**\*REMARQUE\*: Le variateur ne fonctionne pas si le réveil se trouve en mode de rappel d'alarme.**

### **Vibreux pour lit / vibreur –**

- 1) Fixez le connecteur du vibreur de lit au dos du réveil, sur l'entrée **du VIBREUR (17)**.
- 2) Placez le vibreur sous le matelas ou l'oreiller.

### **Chargement USB -**

Ce réveil est équipé d'un port USB pratique placé sur le panneau arrière qui permet de recharger les téléphones portables, lecteurs de disques mobiles et autres appareils portables de plusieurs marques différentes, fournis avec un câble USB. La puissance de sortie du port USB est de 500mA.

Pour charger votre appareil, branchez le câble USB, fourni avec votre dispositif portable dans le **port USB (16)** placé sur le panneau arrière de ce réveil. Vérifiez l'indicateur sur votre appareil pour confirmer qu'il est bien en train de se charger.

**Remarque:** la durée de charge variera en fonction du courant de charge requis par votre appareil. Par conséquent, certains appareils prendront plus de temps à se charger que d'autres.

### **Batterie de secours –**

Pour utiliser la batterie de secours, installez une batterie CR2032 à la base du réveil, dans le **compartiment de la batterie (15)**. Veuillez noter qu'en cas de coupure d'électricité, l'écran DEL

n'affichera plus l'heure, mais l'horloge continuera de fonctionner et affichera l'heure correcte dès que l'appareil sera à nouveau alimenté en électricité.

**REMARQUE:** pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide.

#### Alimentation d'entrée CC 5V –

Fixez l'adaptateur de courant CC au dos du réveil sur l'entrée référencée **DC5V  IN (14)**.

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adaptateur secteur homologué UL CA100-240V~, 50/60Hz

Consommation électrique: Sortie de l'adaptateur: CC5V , 800mA

Puissance de charge du port USB: 500mA

 <p>L'éclair et la flèche qui clignotent à l'intérieur du triangle sont des symboles d'alerte qui vous préviennent d'une tension dangereuse présente dans l'enceinte du produit.</p>	<p><b>MISE EN GARDE:</b>  <b>POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU) ARRIÈRE DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST INTÉGRÉE AU PRODUIT. VEUILLEZ VOUS ADRESSER A VOTRE REVENDEUR SONIC ALERT.</b></p>	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle est un symbole d'avertissement qui vous signale la présence d'instructions importantes sur le produit.</p>
---	--	--

**AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

**Les fortes interférences électromagnétiques peuvent entraver le fonctionnement normal de l'appareil. Dans ce cas, il suffit simplement de débrancher, puis de rebrancher l'adaptateur de puissance, afin que l'appareil puisse fonctionner normalement. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, mettez-le dans un autre endroit.**

- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous vous débarrassez des piles ;



-  les points de collecte sont différents s'il s'agit d'appareils électriques ou électroniques.

#### *GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE PRODUIT SONIC ALERT*

Le réveil Sonic Boom est garanti pendant un (1) an, à compter de la date d'acquisition, contre les défauts de fabrication et de matériel. Au cours de cette période Sonic Alert réparera ou remplacera sans aucun frais sur les pièces et la main d'œuvre et à sa seule discrétion l'appareil. Contactez notre service clientèle afin d'obtenir un RA (numéro d'autorisation de retour) et des informations sur la manière de procéder pour retourner votre produit. Appelez le No 1-888-864-2446 ou envoyez un courriel à [RMA@sonicalert.info](mailto:RMA@sonicalert.info). Une copie de la quittance d'achat est nécessaire pour l'obtention du numéro d'autorisation.

*Sonic Alert Warranty Center, 1081 West Innovation Dr., Kearney, MO 64060*

## Sonic Alert

Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083

[www.SonicAlert.com](http://www.SonicAlert.com) / 1-888-864-2446

Fabriqué en Chine